

Obejrzyj film: newfoundland.io

Potrzebujesz tych czterech przedmiotów::

- Nazwa testu
- Wynik
- Dolek
- Probówka
- Szary przycisk
- Zielona nasadka
- Zapewniająca sterylność

Chusteczki
Zegarek
Butelka z płynem testowym

1 Umyj i wysusz ręce. **Sprawdź datę ważności** przed otwarciem foliowej saszetki.

2 **Masuj palec przez 5 do 10 sekund.**

3 **Delikatnie przekręć i wyciągnij zieloną nasadkę, a następnie ją wyrzuć.**

Najpierw przekręć Następnie wyciągnij

PL Potrzebujesz więcej pomocy? Odwróć stronę.

WAŻNE: Nie otwieraj foliowego opakowania, aż nie przeczytasz instrukcji i nie będziesz gotowy do wykonania testu. Zużyć natychmiast po otwarciu.

4 **Wciśnij szary przycisk, aby nakłuć palec.**

Naciśnij mocno

WAŻNE Nakłucie jest jednorazowe!

5 Umieść test na instrukcji obok wyników.

6 **Ściśnij mocno** za miejscem nakłucia, aby uzyskać krew.

Krew

7 **Wypełnij probówkę** krwią. Jeśli probówka nie jest pełna, **ściśnij palec** i dodaj więcej krwi.

Probówka

Dotknij krwią końcówki probówki

WAŻNE W razie trudności wytrzyj palec do czysta i ponownie ściśnij

WAŻNE W POŁOWIE PEŁNA Probówka musi być pełna

PEŁNA W probówce jest teraz odpowiednia ilość krwi

8 Przytrzymaj test na stole. Teraz **obróć probówkę** do dolka.

Obróć

WAŻNE Sprawdź, czy krew spłynęła z probówki do dolka

9 Dodaj **4 krople** do dolka.

WAŻNE 4 krople

10 Odczekaj **15 minut** przed odczytaniem wyniku. **Nie odczytuj wyników po 20 minutach.**

WAŻNE 15

Wyniki

Upewnij się, że odczekałeś pełne 15 minut.

Jeśli twój palec dalej krwawi, wytrzyj go chusteczką lub użyj plastra z opatrunkiem.

Dokładnie dopasuj swój wynik do opcji **-**, **?** lub **+**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat HIV, odwróć stronę.

- HIV negatywny

Jeżeli pojawi się jedna linia w polu C - masz negatywny wynik HIV. Nie może być linii w polu T.

Jest to test przesiewowy. Wykonaj test ponownie po 3 miesiącach.

Dodatkowe informacje znajdziesz na dołączonej karcie wsparcia.

? Test nie zadziałał

Jeżeli w polu C nie pojawi się żadna linia - test nie zadziałał.

Jest to test przesiewowy. Udaj się do lekarza na dalsze badania i konsultację.


Dodatkowe informacje znajdziesz na dołączonej karcie wsparcia.

+ HIV pozytywny

Jeżeli pojawią się dwie linie, nawet słabo widoczne - masz pozytywny wynik HIV.

Jest to test przesiewowy. Udaj się do lekarza na dalsze badania i konsultację.

Dodatkowe informacje znajdziesz na dołączonej karcie wsparcia.

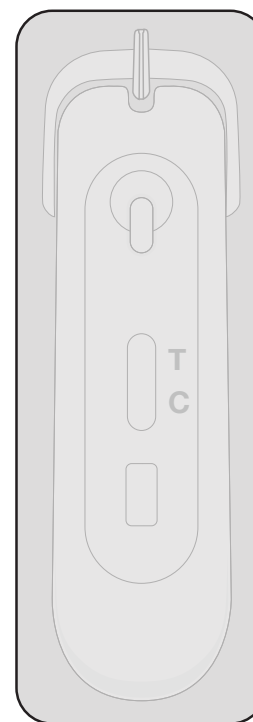

Położ test w tym miejscu, to pomoże w napełnieniu probówki



